

Инструкция по сбору ногтей на исследование микроэлементного состава

Информация о биоматериале и контейнере.	Для исследования необходим образец ногтей. В медицинском офисе лаборатории необходимо заранее взять конверт для сбора биоматериала.
Информация о предварительной подготовке к исследованию.	Ногти должны быть чистыми и сухими. Не допускается нанесение лака для ногтей и иных средств по уходу за одну неделю до сдачи анализа. Также перед процедурой нельзя обрабатывать ногти металлической пилочкой. Перед процедурой срезания ногтей тщательно вымыть руки. Не рекомендуется использовать перчатки из латекса. Инструмент для срезания ногтей (ножницы или бритва) должен иметь очищенные режущие поверхности.
Информация «куда собирать».	Образец ногтей поместить в конверт.
Информация «как собирать».	Порядок сбора ногтей Важно!!! Ногти собирать для анализа только в том случае, если отобрать волосы принципиально невозможно. 1. Ногти срезать со всех пальцев обеих рук или ног, указав соответствующий источник на бланке заказа. Длина срезаемых ногтей должна быть не менее 2 мм. 2. Срезанные ногти помещают во внутренний маленький конверт. 3. Внутренний маленький конверт вместе с собранным материалом и заполненный бланк заказа необходимо поместить в большой конверт. На большом конверте указать свои Ф.И.О., дату рождения и пол.
Информация о недопустимых условиях, если есть таковые.	Важно!!! В бланке заказа необходимо обязательно заполнить все пункты. Если предварительная подготовка к исследованию не проведена должным образом, то результат исследования будет выдан в искаженном виде. В этом случае лаборатория INVITRO не несет ответственности за достоверность выдаваемого результата.
Информация о том, сколько времени и в каких условиях можно хранить и транспортировать пробу от момента сбора до момента доставки в МО.	Возможно длительное хранение образца ногтей без специальных условий.

Действует с 29.01.2018