

Взятие крови проводится строго натощак!

Все расчеты выполняются по алгоритмам в патентованной лицензионной программе фирмы Bio-Predictive (Франция)

030 ●

030 ● ●

030 ● 

Расчет по ранее выполненным тестам СтеатоСкрин:

**ВЗЯТИЕ
КРОВИ НЕ
ПРОВОДИТСЯ!**

**ВЗЯТИЕ
КРОВИ НЕ
ПРОВОДИТСЯ!**

Специальные обозначения: ● — пробирка с красной крышкой с гелем ●🌀 — пробирки центрифугировать через 30-45 мин. после взятия

Внимание! Ряд факторов могут привести к ложноположительным или ложноотрицательным результатам, ограничивая применимость теста.

- Гиперлипемическая сыворотка или сыворотка, в которой произошел гемолиз (++) для анализа непригодны.
- Стоит ограничить применение теста при приступах малярии, при приеме рибавирина и азиоприна при остром гепатите, вызванном лекарственными препаратами, суперинфицированием вирусами гепатитов А, В или EBV, а также гепатитах аутоиммунной природы. Не рекомендуется применять тесты при обширных некрозах печени, при острой бронхо-легочной или мочевого бактериальной или вирусной инфекциях, а также при остром холестазе, вызванном желчекаменной болезнью.
- Необходима консультация специалиста при патологических состояниях, которые могут повлиять на показатели лабораторных исследований: хронический гемолиз у пациентов с протезом сердечного клапана, наследственная доброкачественная гипербилирубинемия (синдром Жильбера), а так же прием ингибиторов протеаз при лечении ВИЧ, повышающих уровень общего билирубина (Индинавир, Атазанавир) или АЛТ и ГГТ (Ритонавир).
- ФиброТест применим для пациентов с почечной недостаточностью в том числе и у находящихся на гемодиализе, хотя диагностическая ценность его несколько ниже, чем у больных с пересаженной почкой.
- Изолированное увеличение значения одного из компонентов теста должно заставлять специалиста с осторожностью интерпретировать результаты, когда гаптоглобин ниже 0,12 г/л, хотя внутрисосудистый гемолиз исключается; гаптоглобин выше 3,2 г/л, хотя острое воспаление или сепсис исключаются; трансаминазы выше 622 МЕ/л, хотя острый гепатит исключается; билирубин выше 30 мкмоль/л и ГГТ ниже 50 МЕ/л и есть подозрения на синдром Жильбера, а также при изолированном увеличении альфа-2-макроглобулина выше 5,0 г/л.

С ограничениями по применимости теста ознакомлен и с правильностью заполнения бланка согласен

бланк действует с 19.12.14